



Información de esterilización

1 Advertencias, precauciones y notas

1. El uso de soluciones desinfectantes para una limpieza externa de instrumentos no esterilizará el equipo y no es recomendado.
2. No esterilice equipos o accesorios con óxido de etileno (ETO).
3. No esterilice equipos o accesorios utilizando un sistema STERIS o mediante métodos de esterilización comparables.
4. No esterilice equipos o accesorios en esterilizantes fríos como CIDEX.
5. Siempre separe los accesorios del equipo antes de la esterilización.
6. No embolse las piezas de mano para la esterilización. La esterilización en una bolsa sellada atrapa la humedad que puede causar daños.
7. La válvula de control de succión, si existe, debe estar en la posición completamente abierta durante la esterilización.
8. Los accesorios con mecanismos de collar deben esterilizarse con el collar completamente abierto.
9. No use el equipo mientras esté caliente. Permita un tiempo adecuado para enfriar antes de usar. Enfriar por exposición a temperatura ambiente. El funcionamiento del equipo que no está completamente frío o seco puede disminuir Rendimiento y / o fiabilidad.
10. Al esterilizar equipos y accesorios en una bandeja de esterilización del sistema, use los parámetros de esterilización en su manual de instrucciones.
11. Se debe ejecutar un ciclo de secado mínimo de ocho (8) minutos en todos los equipos y accesorios cada vez que el producto es esterilizado. Si no se utiliza un ciclo de secado en los productos, se puede reducir el rendimiento o falla prematura del producto.

2 Instrucciones de esterilización

La esterilización con vapor es segura y efectiva y no tiene contraindicaciones para esterilizar este equipo.

NOTAS

Para obtener información sobre la esterilización de la batería, consulte la información asociada que se incluye con la batería o Manual de instrucciones del cargador-

1. Envuelva individualmente la pieza de mano y los accesorios.
2. Siga los tiempos mínimos de exposición a la esterilización recomendados a continuación.
3. Utilice los parámetros de bandeja recomendados en su manual de instrucciones cuando esterilice piezas de mano y accesorios en una bandeja de esterilización del sistema.

Las piezas de mano y los accesorios se pueden procesar en un esterilizador de vapor de pre-vacío (pre-vacío de vapor) o en un esterilizador de desplazamiento por gravedad (hacia abajo) (Steam Gravity).

Los tiempos mínimos de exposición recomendados para la esterilización son los siguientes:

Tabla 1: Parámetros de esterilización

Método	Ciclo	Temperatura Mínima	Exposición Mínima	Ciclo de Secado Mínimo
Vapor	Pre-Vacío	270°F(132°C)	4 Minutos	8 Minutos
Vapor	Gravedad	250°F(121°C)	30 Minutos	8 Minutos